

Instructions pour une utilisation correcte

Bottes pour sabot SG / SG-L



- 1 Avant la première utilisation, la lanière de cheville est fixée une fois à l'aide du velcro court à la fente intérieure de la coque de la balle.



- 2 Desserrez la sangle de fermeture et fixez le velcro sur le côté de la barre centrale.



- 3 Faites glisser l'hipposandale du bout vers l'arrière sur le sabot. La boucle de la sangle de fermeture doit être visible à l'extérieur.



- 4 Avec une légère tape sur l'avant de la hipposandale, assurez-vous que le sabot est bien avancé dans la chaussure. Veillez à ce que la chaussure soit droite. Pour les chevaux avec beaucoup de fanons, tirez les poils vers l'extérieur.

REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Instructions pour une utilisation correcte

Bottes pour sabot SG / SG-L



- 5** Déposez maintenant le sabot et contrôlez, en soulevant la coque de la plante du pied, que la chaussure est bien en place.



- 6** IMPORTANT ! Passez la sangle du paturon avant de serrer la sangle de fermeture. Pour ce faire, poussez légèrement la coque des glomes vers l'arrière.



- 7** Serrez fermement la sangle de fermeture et fermez la chaussure à l'avant, de manière à ce que la sangle s'ajuste proprement tout autour. En position finale, la boucle en métal se trouve directement devant le guide latéral de la sangle.



- 8** Fermez maintenant la sangle du paturon. Elle doit être bien ajustée, mais ne doit pas être (un doigt de large) trop serrée.

REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com

